

FICHE TECHNIQUE

Code article : C0190000

DESINFECTANT HYDRO ALCOOLIQUE "PHAGO'SPRAY DASR"


PHAGO'SPRAY DASR 750ML DES PAE CCA SS RINCAGE ECOCERT

Le PHAGO'SPRAY est un désinfectant hydro-alcoolique pour la désinfection des surfaces, des équipements et des mobiliers propres. Ne laisse pas de traces sur les surfaces.

Le PHAGO'SPRAY peut être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.

Le PHAGO'SPRAY peut être utilisé, sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (table, plan de travail, plateaux, chariot de repas, trancheurs, hachoirs, couteaux...).

Le PHAGO'SPRAY peut être également utilisé sur les jouets pour une désinfection complète

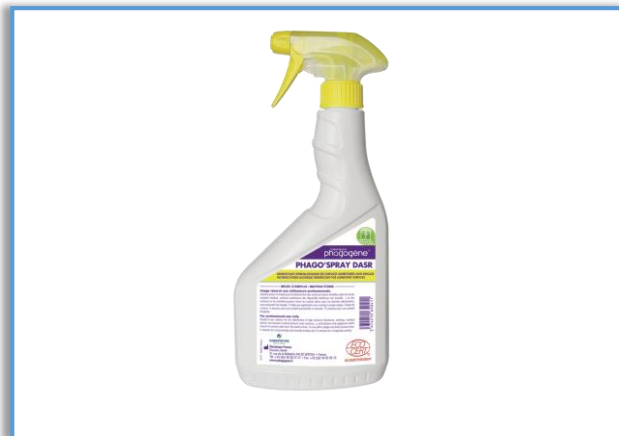

AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

- Désinfection de mobiliers / mobiliers en contact avec des denrées alimentaires (tables, plateaux, chariots repas, trancheurs hachoirs, couteaux...)
- Prêt à l'emploi
- Large spectre désinfectant
- Formule Eco-certifiée
- Produit « contact alimentaire » sans rinçage

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : Liquide limpide – couleur incolore
- **Parfum** : Alcool
- **pH (solution à 1%)** : 5 à 7
- **Densité (20 °C)** : 1 +/- 0.010g / cm³

CONDITIONNEMENT : Bidons de 750ML de 6 bidons par carton 450 bidons par palette

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

MODE D'EMPLOI :

Le **PHAGO'SPRAY** est prêt à l'emploi.

- Pulvériser sur un linge à usage unique et appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer.
- Pulvériser les surfaces préalablement nettoyées à une distance de 20 à 30 cm à raison de 30-40 ml/m².
- Laisser agir 5 minutes pour une activité bactéricide et virucide; 15 minutes pour une activité fongicide.

Compatibilité : faire un essai au préalable sur plexiglass.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit réservé à un usage professionnel
- Péréemption : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com

*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux.*

Respecter les précautions d'emploi.

Produit TP2-4 :

« Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>

REGLEMENTATION / CONFORMITE :

Normes	Concentration	Temps
<u>BACTERICIDE</u>		
EN 1040 (<i>P. aeruginosa</i> et <i>S. aureus</i>)	100%	5 min.
EN1276 (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i>)	100%	5 min.
EN13727+A2 (<i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>)	80%	5 min.
EN13697 (<i>E. coli</i> , <i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>S. typhimurium</i> et <i>L. monocytogenes</i>)	100%	5 min.
EN16615 (<i>E. hirae</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>)	100%	1 min.
<u>FONGICIDE</u>		
EN1275 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100%	15 min.
EN1650 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100%	15 min.
EN13624 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	97%	15 min.
EN13697 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100%	15 min.
EN16615 (<i>C. albicans</i> et <i>A. niger</i>)	100%	5 min.
<u>MYCOBACTERICIDE</u>		
EN14348 (<i>M. terrae</i> et <i>M. avium</i>)	97%	5 min.
<u>VIRUCIDE</u>		
BVDV et Vaccinia virus selon RKI	100%	5 min.
Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclus VRS), orthomyxovirus, Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1	100%	5 min.
EN14476+A1 (<i>Norovirus</i> et <i>Rotavirus</i>)	97%	15 min.

Mis à jour le 15 avril 2021

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>