

FICHE TECHNIQUE

Code article : C0410000

DESINFECTANT PHAGO'SPRAY DASR 5L DES SURFACES PAE CCA SS RINCAGE ECOCERT

Désinfectant hydro-alcoolique pour la désinfection des surfaces, des équipements et des mobiliers propres sans rinçage



AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

Le PHAGO'SPRAY DASR est un désinfectant hydro-alcoolique pour la désinfection des surfaces, des équipements et des mobiliers propres. Ne laisse pas de traces sur les surfaces. Il peut être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide du petit mobilier, des chariots, des surfaces extérieures des dispositifs médicaux non invasifs et des petites surfaces proches du malade.

Le PHAGO'SPRAY DASR peut être utilisé, sans rinçage sur les surfaces pouvant se trouver en contact direct avec les denrées alimentaires (table, plan de travail, plateaux, chariot de repas, trancheurs, hachoirs, couteaux...)

Il peut être également utilisé sur les jouets pour une désinfection complète

Prêt à l'emploi

Large spectre désinfectant

Produit « contact alimentaire » sans rinçage

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : Liquide limpide
- **Parfum** : Alcool
- **pH (solution à 1%)** : 4 à 7
- **Densité (20 °C)** : 1 +/- 0.010g / cm³
- **Matières actives** :

Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 52,70% m/m.

Contient aussi : eau, correcteur d'acidité. 99,90% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

TP2 – Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

TP4 – Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires

CONDITIONNEMENT : 2 bidons de 5 L par carton - 144 bidons par palette

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

MODE D'EMPLOI :

Le PHAGO'SPRAY DASR est prêt à l'emploi.

Pulvériser sur un linge à usage unique et appliquer sur la surface à désinfecter. Ne pas rincer.

Pulvériser les surfaces préalablement nettoyées à une distance de 20 à 30 cm à raison de 30-40 mL/m².

Laisser agir 15 minutes pour avoir un spectre de désinfection complet, ou selon l'activité souhaitée

PRECAUTIONS :

Produit réservé à un usage professionnel.

La fiche de données de sécurité est disponible sur le site www.quickfds.com

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

REGLEMENTATION / CONFORMITE :

TP2 – Désinfectant pour les surfaces, matériaux, équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

TP4 – Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur:
<http://detergents.ecocert.com>

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>

Activité antimicrobienne :

BACTERICIDE

EN 1040, 5 min

EN 1276 dont *S. typhimurium* et *L. monocytogenes*, 30 s

EN 13727+A2, 5 min

EN 13697 dont *S. typhimurium* et *L. monocytogenes*, 2 min

EN 16615, 1 min

FONGICIDE

EN 1275, 15 min

EN 1650, 15 min

EN 13624, 15 min

EN 13697, 5 min

EN 16615, 5 min

EN 14348, 5 min

MYCOBACTERICIDE

EN 14348, 5 min

VIRUCIDE

BVDV et Vaccinia virus selon RKI, 5 min

Actif sur HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclus VRS), orthomyxovirus, Influenza A/H5N1 et Influenza A/H1N1, 5min

EN 14476+A2 (Norovirus et Adenovirus), 5 min

Mis à jour le 1 juillet 2021

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

<http://www.cristaldistribution.com/>